

ISTRUZIONI PER EFFETTUARE IL TEST

(il paziente deve essere a digiuno)

1



fig. A



fig. B

Estrarre la sacca sterile Alveolar Air System dalla busta (fig. A) e controllare che il rubinetto sia aperto (fig. B).

Aprire la molla di plastica del tubicino (fig. C) e soffiare per almeno 6 secondi fino a riempire la sacca (fig. D).

2



fig. C



fig. D

Chiudere immediatamente il rubinetto della sacca (fig. E) e la molla di plastica (fig. F).

3



fig. E



fig. F

Alveolar Air System

per il problema del respiro alterato

ITALCOPROCT

4



fig. G

Aprire il rubinetto e prelevare 20 cc di aria con la siringa (fig. G).

fig. H



5

Rimuovere la siringa tenendo la punta rivolta verso il basso e chiuderla con il tappo di plastica (fig. H).

6

Contrassegnare la siringa con l'adesivo n°1 fornito nel Kit (espirato di base) e riporla nella scatola del Kit.

7

Svuotare completamente la sacca per renderla pronta per la fase successiva.

8

Somministrare al paziente 7ml di sorbitolo al 70%, disciolti in un bicchiere d'acqua. **Attendere 30 minuti** e ripetere la procedura descritta in precedenza, raccogliendo 20 cc di aria e contrassegnando la siringa con l'adesivo n°2.

9

Continuare a raccogliere la stessa quantità di campioni d'aria per **altre sette volte ogni 30 minuti** contrassegnando le siringhe con gli adesivi n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e riponendole nella scatola.

10

Ora il test è ultimato! Deve essere inviato per l'analisi finale. Riempire la cartolina di richiesta di analisi ed inserirla nella scatola del Kit dopo aver staccato la sezione che rimarrà al medico richiedente come memoria.

11

Chiudere il Kit con l'apposito sigillo di garanzia. Inserire i dati del mittente nello spazio sul retro della scatola del kit. Spedire il Kit, a mezzo Posta Prioritaria o Posta Celere, o a mezzo corriere, all'indirizzo del destinatario stampato sul retro della scatola.