



Benefici

- Metodo NON INVASIVO, semplice ed indolore
- Indicato per adulti e bambini
- Fornisce informazioni sulla possibile presenza di patologie di reflusso

Che cos'è il PEPTEST™

Il PEPTEST™ è una metodica diagnostica innovativa per individuare in modo semplice e rapido pazienti sofferenti di reflusso del succo gastrico. Il test rileva la presenza della pepsina in campioni clinici provenienti dal tratto digestivo superiore e dalle vie respiratorie. La pepsina, l'enzima responsabile della digestione delle proteine introdotte con la dieta, è il principale agente aggressivo responsabile dei danni al tessuto esofageo e laringeo. La pepsina, se presente, rappresenta un marker altamente predittivo di reflusso gastrico.

A chi è consigliato l'esame?

Pazienti che soffrono di Reflusso sintomatico (sintomi periodici): i sintomi tipici sono il bruciore di stomaco ed il rigurgito. Ulteriori sintomi possono comprendere la tosse cronica, lo schiarirsi la gola, i disturbi della voce, la difficoltà a deglutire, il fiato corto, gli attacchi asmatici e la riacutizzazione della COPD (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Pazienti che soffrono di Reflusso silente (sintomi continui): può essere causato da reflusso nell'esofaringe, gola, corde vocali, vie aeree/polmoni e altri distretti. La sintomatologia comprende la raucedine, la sensazione di avere un "nodo in gola", il mal di gola, la sinusite, l'apnea durante il sonno, il russare e la formazione di carie.

Prelievo del campione

1 Tossire per "pulire" la gola



Chiedere al paziente di tossire per richiamare materiale dalla gola e di depositare la saliva e l'escreato dentro la provetta fornita

2 Sputare dentro la provetta per raccogliere 1 ml circa di saliva



Chiedere al paziente di ripetere la procedura fino a quando la provetta conterrà almeno 1 ml di materiale; utilizzare come riferimento il bordo inferiore dell'etichetta bianca

3 Agitare energicamente



Richiudere con il tappo ed agitare la provetta affinché il campione si mescoli perfettamente con l'acido citrico contenuto nella provetta



Distribuito in esclusiva da:

BIOHIT HealthCare Srl

Innovating for Health

Biohit Healthcare Srl

Via Boncompagni, 3 – 20139 Milano Italy
Tel +39.02.38238113 | Fax +39.02. 38236521
info.italy@biohit.fi | www.biohithealthcare.com

PEP • TEST™

Produced in the UK by RD Biomed Limited

rd
rdbiomed