

FASTCHECKPOC20 ATOPY



ESECUZIONE


Per eseguire l'analisi è necessario disporre del kit FCP 20 ATOPY, guanti monouso e di un timer.

1. Premere il pungidito sul polpastrello fino a sentire lo scatto;
2. Raccogliere 200µl di sangue (in alternativa plasma o 67µl di siero), fino al tampone bianco, utilizzando l'apposito capillare;
3. Trasferire il sangue nella soluzione diluente (tappo rosso) tenendo premuto il cappuccio arancione;
4. Agitare la fiala per mescolare la soluzione;
5. Prelevare l'intero contenuto della fiala con la siringa ed iniettarlo all'interno del dispositivo mediante l'apposita porta.
Incubazione di 8 minuti;
6. Prelevare con la siringa tutta la soluzione di lavaggio (tappo blu).
Iniettare nel dispositivo;
7. Prelevare con la siringa tutta la soluzione anticorpale 1 (tappo trasparente).
Iniettare nel dispositivo.
Incubazione di 8 minuti;
8. Prelevare con la siringa tutta la soluzione di lavaggio (tappo blu).
Iniettare nel dispositivo;
9. Prelevare con la siringa tutta la soluzione anticorpale 2 (tappo giallo).
Iniettare nel dispositivo.
Incubazione 8 minuti;
10. Prelevare con la siringa tutta la soluzione di lavaggio (tappo blu).
Iniettare nel dispositivo;
11. Prelevare con la siringa tutto il reagente enzimatico (fiala marrone, tappo bianco).
Iniettare nel dispositivo.
Entro 30 secondi prelevare con la siringa l'intero contenuto della seconda fiala di reagente ed iniettarlo nel dispositivo.
Incubazione di 5 minuti;
12. Prelevare con la siringa tutta la soluzione tampone (tappo verde).
Iniettare nel dispositivo.


INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Seguire le istruzioni riportate nella scheda di valutazione per una corretta lettura dei risultati.

La membrana è composta da 20 finestre in corrispondenza delle aree test, ognuna dotata di due controlli (debole positivo e positivo) ed un pozzetto per gli allergeni (singoli o mix) indicati dai rispettivi codici standard.

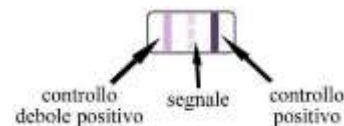

Per ogni allergene la scheda consente di individuare 5 diversi livelli di risposta che fanno riferimento al **sistema ImmunoCAP**. Risultano significativi tutti i risultati a partire dal livello 2.

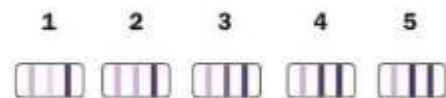

ALLERGENI VALUTATI

Ambrosia	Albume (uovo di gallina)
Artemisia comune	Latte vaccino
Coda di topo	Merluzzo
Graminacee (mix)	Frumento
Segale	Arachide
Betulla	Soia
Ficus/Lattice (mix)	Sedano
Pelo di gatto	Mandorla
Pelo di cane	Noce
Acaro domestico	Nocciola