


ISTRUZIONI PRELIEVO

Test da sangue capillare

AUTOPRELIEVO CAPILLARE CON TAMPONE

Per poter eseguire l'autoprelievo capillare al meglio, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Togli il tappo rosso da una delle provette vuote.
2. Estrai il tampone dalla busta sterile.
3. Inserisci l'asta del tampone all'interno del tappo rosso per utilizzare il tappo stesso per avere un'ottima presa del tampone.
4. Massaggiare il polpastrello scelto per qualche minuto. Se la mano risulta fredda lavare con acqua calda per favorire meglio la circolazione. Favorire l'afflusso del sangue verso l'estremità del dito con ripetute lievi pressioni.
5. Disinfettare la zona del polpastrello del dito scelto.
6. Ruotare la protezione dell'ago del pungidito di 360 gradi e sfilarla.
7. Posizionare il pungidito sul polpastrello e premere il bottone posteriore del pungidito.
8. Accertarsi che la mano scelta si trovi sotto il livello del cuore.
9. Con pressione, massaggiare il dito in direzione della puntura per facilitare la fuoriuscita del sangue.
10. Afferrando la bacchetta il più vicino possibile al tampone, appoggiare delicatamente il tampone sulla goccia di sangue e lasciare assorbire. Ripetere l'operazione più volte.
11. Il tampone deve essere imbibito di sangue per tutta la propria lunghezza.
12. Dopo aver effettuato il prelievo, reinserire il tampone nella rispettiva provetta porta-campione.
13. Riporre la/le provetta/e con il campione più tutto il materiale non utilizzato all'interno della busta trasparente.
14. Inserire la busta trasparente ed i moduli emessi, debitamente firmati dal paziente, nella scatola di spedizione.
15. Posizionare la scatola di spedizione all'interno della busta del corriere fornita, in attesa del passaggio del corriere.

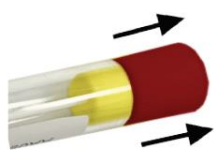

PUNTO 1



PUNTO 2



PUNTO 3



PUNTO 10



PUNTO 11



PUNTO 12

IAM CONSULTING SRL

Via Ripagrande 55, 44121 Ferrara

tel: +39 0532.1716599 / +39 081.0380470

e-mail: info@iamconsultingsrl.it

website: www.iamconsultingsrl.it