

HELORI® UREASE

Test rapido per il rilevamento dell'attività ureasica da *Helicobacter pylori* su prelievo biotico, con lettura visiva.

MATERIALE KIT

Test totali: 15

N. controlli: 1 controllo positivo, 1 controllo negativo

Diluyente: 1

Confezionamento: provette contenenti il liofilo da ricostituire

CARATTERISTICHE

Campione: frammento biotico

Tempi di incubazione: minimo 30'

Lettura: visiva

Sensibilità: 98%

Specificità: 100%

Validità dalla data di produzione: 12 mesi

Validità alla consegna: 2/3 dell'intera validità

Modalità di conservazione: temperatura ambiente

Classificazione sostanze pericolose: Xi

SMALTIMENTO RIFIUTI GENERATI

I controlli devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

La reazione è positiva quando il reagente vira da giallo a rosso Magenta, indicando pertanto la presenza di *H. pylori*.

Per permettere un rilevamento precoce, si consiglia di non agitare la provetta, dato che il viraggio si osserva quasi subito nelle immediate vicinanze del frammento biotico.